



CONSEILS D'UTILISATION

Comment monter les verres
sur les **OSMOSE Polar Clip Ultem** ?

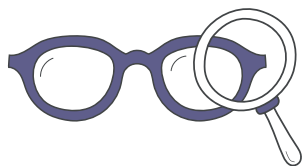

Pas de surcote

Cela permet d'éviter les tensions du verre dans la monture qui risqueraient de faire céder le cercle. Une vérification du verre au tensiscope est conseillée.

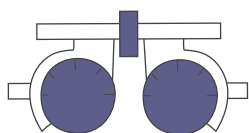

Précalibrage des verres

Pour les corrections convexes supérieures à 2 dioptries, préférez une commande avec un précalibrage et, quand cela est nécessaire, favorisez les verres asphériques afin d'avoir un verre plus plat.



Montage à froid

Ne pas monter à chaud au risque de déformer l'Ultem.



Utilisation de produits doux

Éviter les produits agressifs comme l'acétone ou le détergent. Préférez plutôt des produits doux comme l'eau chaude, l'alcool éthylique en petite quantité, les bacs/boîtes à ultrasons.

